

# Gebruiksaanwijzing EVATEX® evacuatiedoek

## Het product

Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op de volgende uitvoeringen van de Evatex evacuatiedoek:

- EVATEX® evacuatiedoek Standaard (90x200)
- EVATEX® evacuatiedoek Vario (90x200, 100x200, 120x200 en 90x220)

De EVATEX® evacuatiedoek is een evacuatiedoek die onder het matras van een bed kan worden geplaatst en zo ingezet kan worden voor een veilige en snelle evacuatie van mensen die aan bed gebonden zijn of niet makkelijk/snel uit bed kunnen komen.

De Evatex evacuatiedoek zorgt ervoor dat deze personen in een noodsituatie toch verplaatst (geëvacueerd) kunnen worden, waarmee dit een levensreddend hulpmiddel kan zijn.

De Evatex evacuatiedoek wordt bijvoorbeeld gebruikt in verzorgingshuizen, ziekenhuizen en woongroepen en wordt bijvoorbeeld toegepast door de bedrijfshulpverlener (BHV'er) of de brandweer.

## Het plaatsen van de EVATEX® evacuatiedoek

- Verwijder het matras van het bed.
- Leg de EVATEX® evacuatiedoek op de lattenbodem.
- Leg de EVATEX® evacuatiedoek zo neer, dat het etiket en de gordels zichtbaar zijn (op het etiket staat de richting van het voeteneind aangegeven).
- De veiligheidsgordels worden gevouwen en in de hiervoor bedoelde zakjes gestoken.
- Het matras kunt u vervolgens weer terugplaatsen.
- Plaats de banden op de hoeken van de Evatex evacuatiedoek om de hoeken van het matras.
- Trek de veiligheidsgordels een klein stukje tussen het matras en het laken uit, zodat ze sneller gevonden kunnen worden bij een evacuatie.

## Dagelijks gebruik

- De Evatex evacuatiedoek ligt (als een matrasbeschermer) tussen het matras en de lattenbodem.
- Controleer bij het opmaken van het bed of de banden het matras nog op de plaats houden.
- Wanneer de veiligheidsgordels uitsteken, plaats ze dan terug op de hierboven beschreven manier.


## In het geval van een evacuatie

- Eén hulpverlener evacueert één persoon.
- Leg de cliënt uit wat er gaat gebeuren.
- Maak de cliënt vast met de veiligheidsgordels (die over het dekbedovertrek/de deken heen gaan).
- Bij een antidecubitusmatras: maak de slangen los en knoop deze indien nodig vast.
- Zorg dat het bed op de laagste stand staat (bij stroomuitval is deze stap niet van toepassing).
- Pak met beide handen de (grip)lussen aan het voeteneinde vast.

**Let op: EVATEX® evacuatiedoek niet als draagdoek gebruiken. Maximale sleeplast is 250kg.**

- Trek het matras met de cliënt (voeten eerst) in een hoek van 75 tot 90 graden ten opzichte van het bed oppervlak.
- Als de cliënt alleen nog met het bovenlichaam op het bed ligt, het matras zachtjes op de vloer laten glijden.
- Pak met beide handen de (grip)lussen aan het voeteneinde vast en sleep het matras met gestrekte armen en een rechte rug naar achteren over de vloer.
- *Let op: Vloerbedekking zorgt voor extra weerstand bij het slepen. Indien nodig met twee personen slepen.*

- Bij evacuatie over de trap: maak voor de trap en bij de eerste treden wat vaart.
- Wanneer de matras eenmaal op de trap ligt, glijdt het matras makkelijker.
- Het matras zal de bewoner voor een groot deel beschermen tegen schokken.
- Het matras en het beddengoed blijft bij de bewoner voor eventueel verder vervoer.

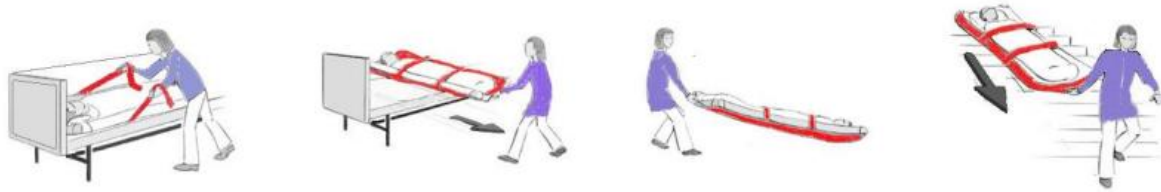

### Was- en onderhoudsinstructies

- Zorg ervoor dat u de gespen in elkaar klikt voordat u gaat wassen!
- Gebruik het gebruikelijke industriële reinigingsmiddel voor ziekenhuizen!
- GEEN toevoeging van andere producten!
- De EVATEX® evacuatiehoek kunt u wassen op een temperatuur tot maximaal 95 graden.
- 105 graden temperatuurbestendig gedurende 10 minuten in thermische desinfectieprocessen.
- BLEKEN NIET toegestaan!
- STRIJKEN alleen bij lage temperatuur (strijken meestal niet nodig).
- DROGE REINIGING niet toegestaan!
- DROGEN aanbevolen bij kamervlucht (alleen in de droogtrommel bij lage temperatuur).
- Persen niet toegestaan!
- Bij INFECTIE of verdenking: warm wassen (95 °C) of op 60 °C wassen met ontsmettingsmiddel

### Contact

- Bij vragen kunt u ons bereiken via onderstaande contactgegevens.
- Ook kunnen wij training met ons product voor u verzorgen.
- Wij raden u sterk aan om eens per jaar een evacuatie te oefenen.
- Wanneer de EVATEX® evacuatiehoek er anders uit gaat zien of beschadigd is, gebruikt u het product dan niet en neem contact met ons op.
- Wij horen graag hoe u ons product ervaart (en of u verbeter suggesties heeft)!
- Een eventueel ernstig voorval dat verband houdt met dit hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

*Let op: Het EVATEX® Evacuatiehoek mag alleen bediend worden door getrainde personen.*



#### Fabrikant:

E.E.H. ug (haftungsbeschränkt)  
Oberstr 3  
47829 Krefeld  
+49-2151-964406  
[Info@evatex.de](mailto:Info@evatex.de)



#### Distributeur:

EvacuatieExpert  
Beukweg 77  
7566 DD Hengelo  
+31-74-8539984  
[info@evacuatieexpert.nl](mailto:info@evacuatieexpert.nl)



Medisch hulpmiddel, klasse I